


Instrucciones de uso de la Implant Card




La tarjeta de implante la deberá rellenar el profesional médico y entregarla al paciente como justificante de la operación.

Rellene los campos previstos:

- 1 Nombre del paciente
- 2 Fecha de implantación.
- 3 Nombre y dirección del hospital/ centro de salud

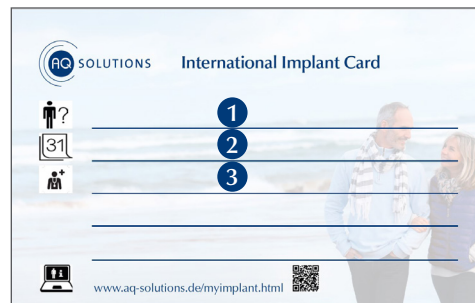

Quite la etiqueta del paciente del embalaje y péguela en la parte trasera prevista de la tarjeta de implante. La tarjeta de implante se genera con cada implante.

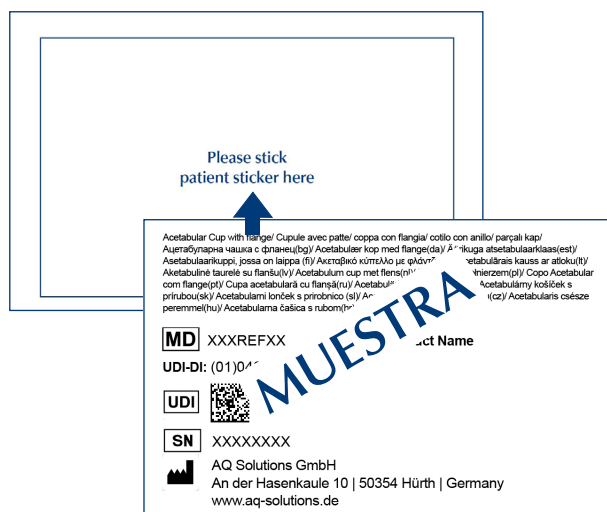

En la tarjeta de implante aparecen los siguientes símbolos:

Símbolo	Aclaración
	Nombre del paciente o identificación del paciente
	Fecha de implantación
	Nombre y dirección del centro de salud
	Fabricante
	Página web con información para pacientes
	Nombre del producto médico
	Número de artículo
	Número de serie*
	Número de lote*
	Identificador único del producto

*Aparece como SN o LOT. Varía según el tipo de implante.

M-93100131.22